

**Diese selbsterstellte Anleitung zur Nutzung des Covid-19  
Schnelltests mit dem Namen**

**“Boson Biotech - Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“**

**ersetzt NICHT die in der Verpackung liegende Anleitung.**

**Diese sollte selbstverständlich gelesen und die  
Warnhinweise beachtet werden.**

**Diese Anleitung dient lediglich zur Vereinfachung der  
Testinstruktion.**

1

# Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test

Öffne die Verpackung. Lege alles aus der Verpackung vor dich hin.



2

Nimm das Röhrchen aus der Tüte.  
Stecke das Röhrchen in das Loch vom Karton.



3

Nimm die kleine Flasche aus der Tüte und öffne sie.  
Schütte die Flüssigkeit in das Röhrchen.





4

Nimm den Tupfer aus der Verpackung.  
Berühre dabei nicht den weichen Teil.



5

Drehe den Tupfer 4 mal in deinem Nasenloch.  
Streich dabei am Rand der Nase entlang.  
Mache das Gleiche nochmal mit dem anderen Nasenloch.



**ACHTUNG:**

Das kann kitzeln.

Wenn es weh tut, dann ist der Tupfer zu tief in der Nase.

6

Stecke den Tupfer in das Röhrchen.  
Drehe deinen Tupfer 5 mal in der Flüssigkeit.  
Lasse deinen Tupfer jetzt 1 Minute in der Flüssigkeit stehen.





7

Drücke das Röhrchen zu.  
Ziehe deinen Tupfer danach heraus.  
Stelle dein Röhrchen zurück in den Karton.  
Stecke das Stäbchen zurück in seine Verpackung.






8

Jetzt drücke den Deckel auf das Röhrchen.



9

Öffne die Tüte und lege die kleine Plastikdose auf den Tisch.  
Fasse die Dose nur an der Seite und nicht auf dem Testfeld an.  
Jetzt musst du dich mit dem nächsten Schritt beeilen.

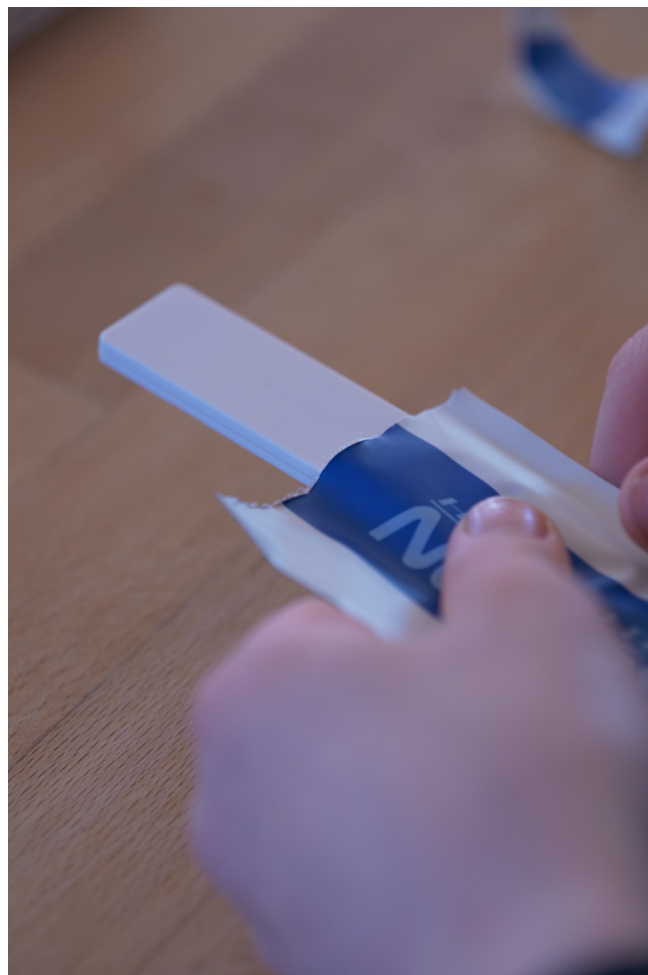

10

Nimm das Röhrchen und die kleine Plastikdose.  
Tropfe 3 Tropfen auf das Loch mit dem S .  
Es sollten keine Luftblasen auf dem Loch sein.  
Jetzt musst du 15 bis 20 Minuten warten.





11

Kontrolliere was nach 15 bis 20 Minuten zu sehen ist.


Auch wenn nur eine schwache Linie zu sehen ist, hast du alles richtig gemacht.



Positiv



Negativ

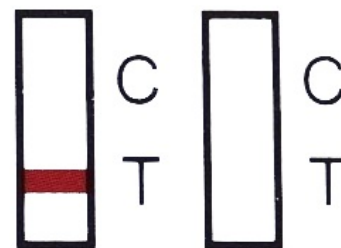

Ungültig

**ACHTUNG:**

Ist der Test positiv, musst du zum Arzt.

Der Arzt macht mit dir dann nochmal einen noch genaueren Test.